

مدت زمان ماندگاری محلول بعد از رقیق کردن	زمان تماس	نحوه رقیق کردن	موارد استفاده	نام ماده ضد عفونی کننده
<p>۱۰-۱۴ روز با توجه به دفعات استفاده و میزان آلودگی</p>	<p>۱۵ دقیقه</p>	<p>محلول ۲٪: ۲۰ سی سی دکونکس ۵۳ plus + ۹۸۰ سی سی آب</p>	<p>وسایل پزشکی و دندانپزشکی که امکان غوطه ور شدن دارند : تیغه های لارنگوسکوپ - ست جراحی و پانسمان - لوله ونتیلاتور و ساکشن - مانومتر اکسیژن</p>	<p>Deconex 53 plus</p>
<p>۲۴ ساعت (محلول دور از نور نگه داشته شود و در زمان استفاده از ماسک استفاده شود.)</p>	<p>۱۰ دقیقه</p>	<p>محلول ۱ به ۱۰۰ برای سطوح صاف و محلول ۱ به ۱۰ برای قسمت های دارای برجستگی و فرورفتگی یا خون بیش از ۳۰ سی سی در کف آمبولانس</p>	<p>سطوح : کف آمبولانس ، پنجره ها و سقف آمبولانس</p>	<p>آب ژاول (وایتکس)</p>